



# BOTELLA LAVAOJOS DE EMERGENCIA



## INSTRUCCIONES DE USO

- Saque la botella del soporte
- Abra la tapa de la botella lavaojos.
- Apoye suavemente la taza lavaojos contra el globo ocular, y manteniendo el ojo abierto, enjuáguelo abundantemente presionando repetidamente las paredes de la botella lavaojos.

**SOLICITE ATENCION MEDICA INMEDIATAMENTE**

**epitécnica**<sup>®</sup>

*Protección Humana*



**ATENCIÓN: ANTES DE PONER EN USO**

Rellenar la botella lavaojos con la solución que se adjunta en el bote estéril.

Usar un bote por cada botella lavaojos